

INSTRUKCJA WGRYWANIA METRYK KRWI KONTROLNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DO ANALIZATORA MYTHIC 18

1. INFORMACJE OGÓLNE

Użycie metryk krwi kontrolnej w postaci elektronicznej ułatwia ich bezbłędne wprowadzenie do analizatora oraz skraca czas eliminując długotrwałe wprowadzanie wartości manualnie.

Wprowadzanie metryk w formie elektronicznej składa się z następujących etapów:

- odpowiednie przygotowanie pendrive'a (formatowanie),
- ściągnięcie plików z metrykami ze strony internetowej i zapisanie ich w odpowiednim folderze na pendrive,
- wgranie metryk do analizatora Mythic 18.


UWAGA: Należy przygotować pendrive o pojemności maksymalnie 2 GB. Pamięć będzie formatowana i należy liczyć się z utratą wcześniej zapisanych w niej danych.

2. PRZYGOTOWANIE PENDRIVE'A

- W analizatorze Mythic 18 należy zalogować się hasłem 123 pozostawiając puste pole z nazwą użytkownika.



- Pendrive o pojemności maksymalnie 2 GB nie zawierający danych, które mogą zostać utracone należy podłączyć do gniazda USB nr 1 lub 2 znajdującego się w tylnej części analizatora:

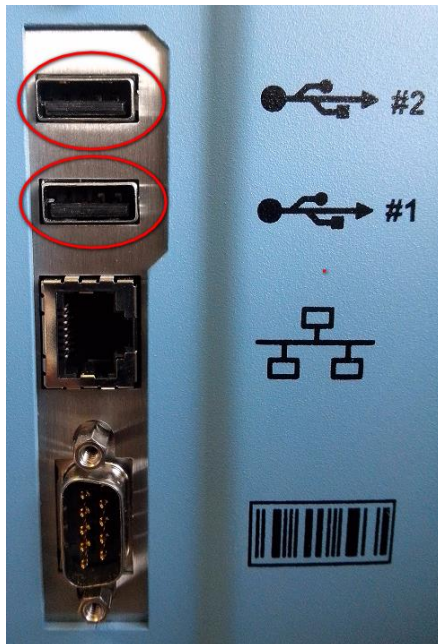

- W menu głównym wybrać opcję USTAWIENIA:




- Wybrać opcję ZAAWANSOWANE:

The screenshot shows a software interface with a blue header bar containing 'POPZEDNI EKРАН', 'OPCJE', 'MENU', and a date/time display '01/02 10:4'. Below the header, the 'DATA I CZAS' section includes fields for 'CZAS' (48) and 'DATA' (01/02/16). Further down, there are dropdown menus for 'JĘZYK' (POLSKI), 'DRUKARKA' (LX300+), and 'WIELK. PAP.' (12" (A4)). Below these are input fields for 'NR. DZIENNY SID' (1) and 'BIEŻĄCY SID' (1). A yellow button labeled 'ZAAWANS.' is circled in red. At the bottom, there are three buttons: 'WYJDź', 'DRUKARKA 3 DODAJ', and 'ZATW.'.

- Wybrać opcję OPCJE ZAPISU:

The screenshot shows a software interface with a blue header bar containing 'POPZEDNI EKРАН', 'OPCJE', 'MENU', and a date/time display '01/02 10:4'. The main area contains a vertical list of yellow buttons: 'DRUKARKA', 'KOMUNIKACJA', 'OPCJE ANALIZY', 'PARAMETRY LABORATORYJNE', 'FAKTORY KALIBRACYJNE', 'INNE USTAMIENIA', 'OPCJE ZAPISU' (circled in red), 'URUCHOM WERSJĘ PROG', and 'NR. APARATU'.


- Wybrać opcję USB PENDRIVE FORMAT:

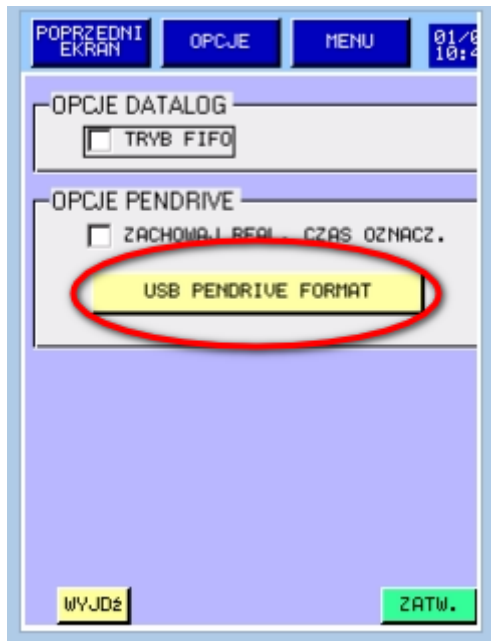


Po wybraniu tej opcji analizator wyświetli komunikat o formatowaniu pendrive'a, który należy zatwierdzić.

Po sformatowaniu pendrive'a należy wpiąć go do komputera. W eksploratorze widoczny będzie katalog o nazwie M18 założony przez analizator.

- Ze strony <http://deklaracjeczgodnoscicormay.pl/index.php?dir=Cormay%2F> pobrać pliki z metrykami krwi kontrolnej oddzielne dla każdego z poziomów: Low, Normal, High. Foldery z metrykami znajdują się w następującej ścieżce dostępu: www.cormay.pl -> Oferta-> Hematologia-> Krew kontrolna-> Metryczki do krwi kontrolnej-> Cormay. Pliki zapisać na dysku lokalnym komputera i przenieść na pendrive do folderu Dysk wymienny (pendrive)->M18->LOT do lub bezpośrednio zapisując w folderze: Dysk wymienny (pendrive)->M18->LOT:

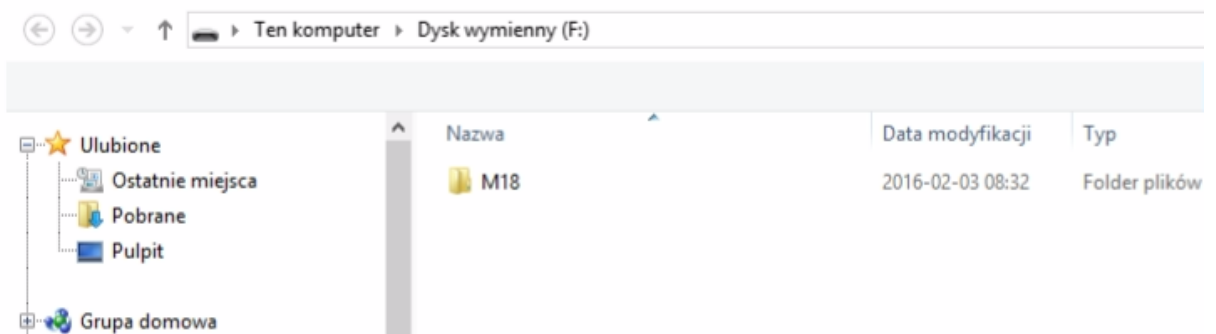

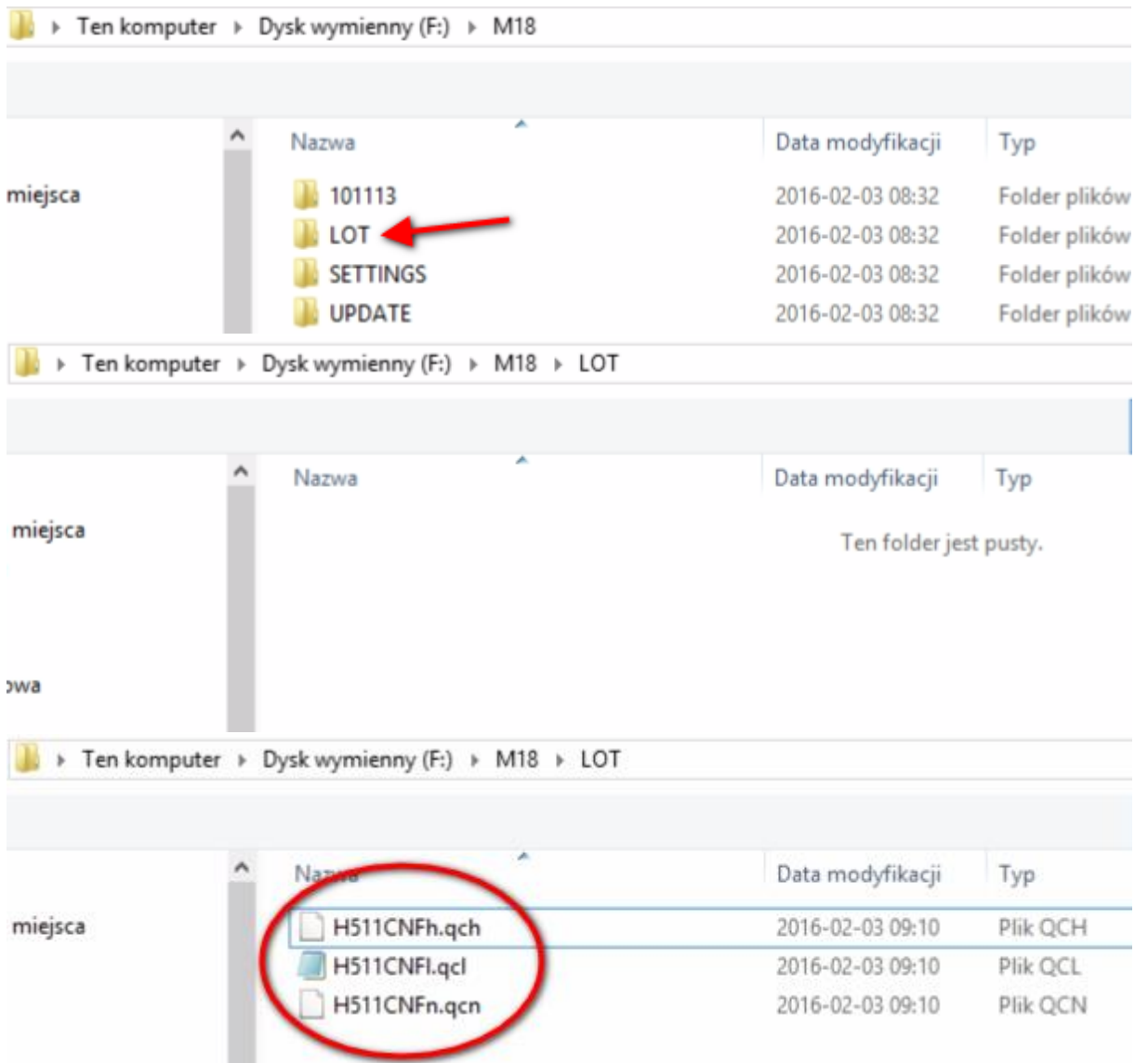


WAŻNE INFORMACJE:


Formatowanie pendrive'a wykonuje się tylko raz. Pliki do folderu LOT można wgrywać dowolną ilość razy, dogrywać nowe, kasować poprzednie.

3. WGRYWANIE METRYK KRWI KONTROLNEJ DO ANALIZATORA:

- W celu zgrania wartości metryk krwi kontrolnej do analizatora należy podłączyć pendrive do analizatora i z menu głównego wybrać opcję KONTROLA JAKOŚCI:

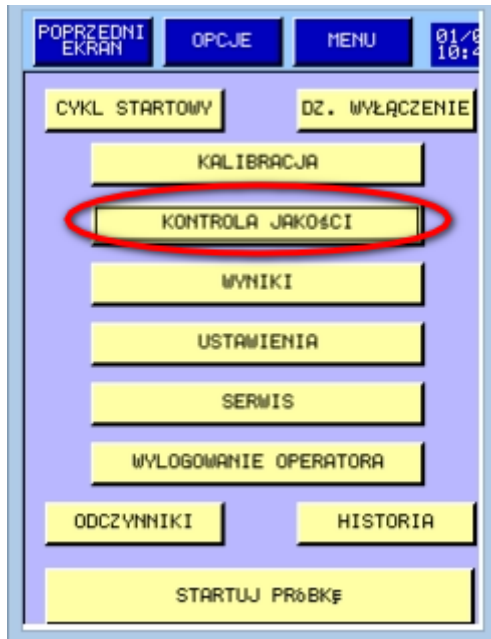

- Należy zaznaczyć miejsce zapisania danych metrykalnych wybierając istniejące już dane lub zaznaczając wolne miejsce na liście serii (1). Po dokonaniu miejsca zapisu, wybrać opcję ZMIANA (2):

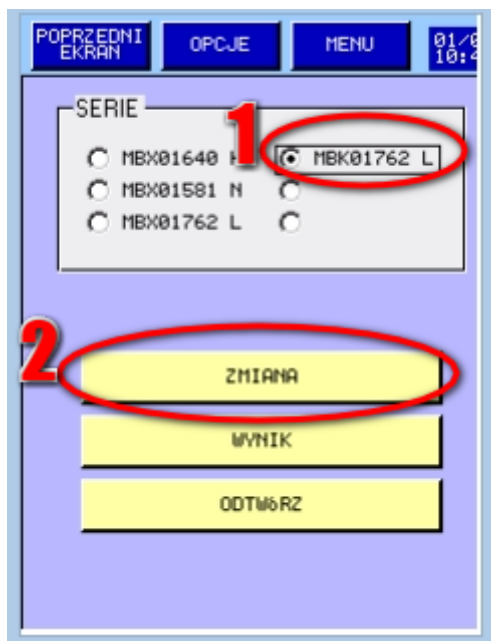

- Pojawią się dane dotychczasowej metryki, którą chcemy nadpisać nowymi danymi lub wartości zerowe w przypadku wyboru wolnego miejsca w poprzednim punkcie:

POPRZEDNI EKRA... OPCJE MENU 01/0 10:4

SER MBK01762 DATA PRZ. 05 02 09

WPR. PRZEZ 15 06 04

BY. JOHN POZIOM

WARTOŚĆ NORMY L N H

WBC	1.9	0.4	WARTOŚĆ NORMY		
LYM	57.0	14.0	LYM%	1.1	0.3
MON	13.0	10.0	MON%	0.2	0.2
GRA	30.0	15.0	GRA%	0.6	0.3
RBC	2.43	0.12	HGB	6.2	0.4
HCT	16.6	1.7	MCV	68.0	5.0
MCH	25.5	2.6	MCHC	37.3	3.3
RDW	10.9	2.7			
PLT	74	19	MPV	7.6	1.9
PCT	0.060	0.030	PDW	46.8	7.0

WYJDź A..Z **ZAŁADUJ** ZATW.


- Po wciśnięciu opcji ZAŁADUJ, pojawia się lista metryk krwi kontrolnej zapisanych na pendrive. Pliki opisane są numerem serii krwi kontrolnej oraz oznakowane literami L, N, H dla identyfikacji poziomów: Low, Normal, High:

POPRZEDNI EKRA... OPCJE MENU 01/0 10:4


SER 458JFD L **2** WPR

	SER	POZIOM
001	ABC123	H
002	ZER456	N
003	458JFD	L
004	CBR488	H
005	MXC789	N
006	ABC128	L
007	ZXR456	H
008	BHAFD	N
009	CJUT288	L
010	C2C3789	H
011	KKDF88	N
012	MBK785	L
013		
014		
015		
016		


- Po wybraniu (zaznaczeniu) interesującego pliku (1) należy wybrać opcję WPR (2). Pojawia się komunikat, który należy zatwierdzić:

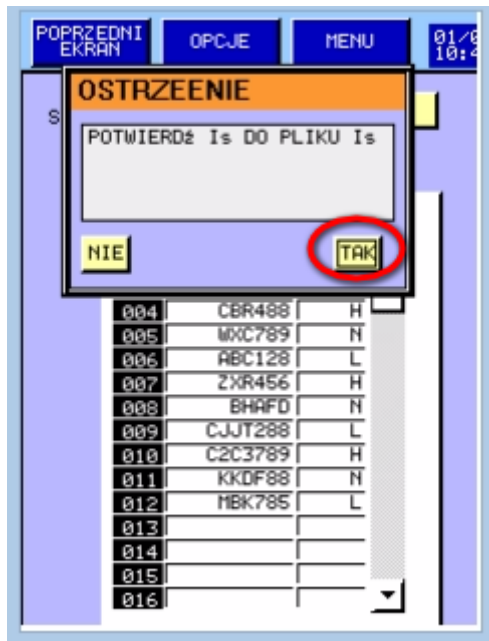


- Dane zostają wpisane w pola. Zaznaczany jest automatycznie poziom, który ma zostać zapisany (1). Należy wcisnąć opcję ZATWIERDŹ:

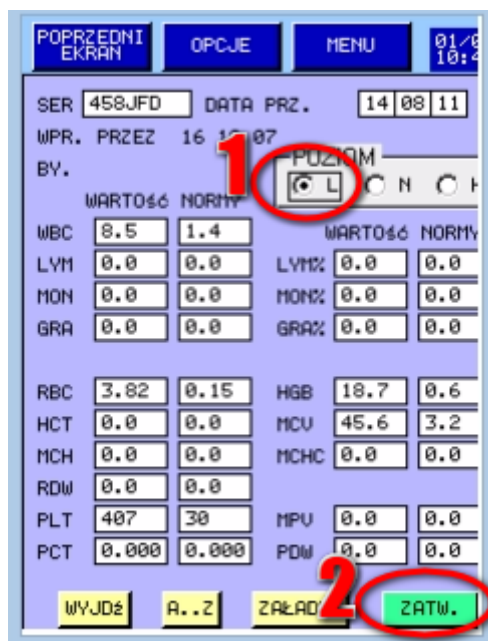

- Pojawia się ostrzeżenie o zapisie zmian, które należy zaakceptować:

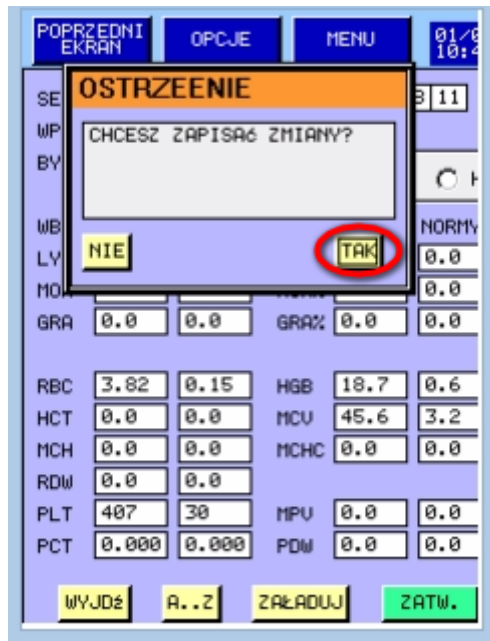

- Pojawia się kolejne ostrzeżenie przed skasowaniem poprzednich danych metrykalnych, które należy zaakceptować:

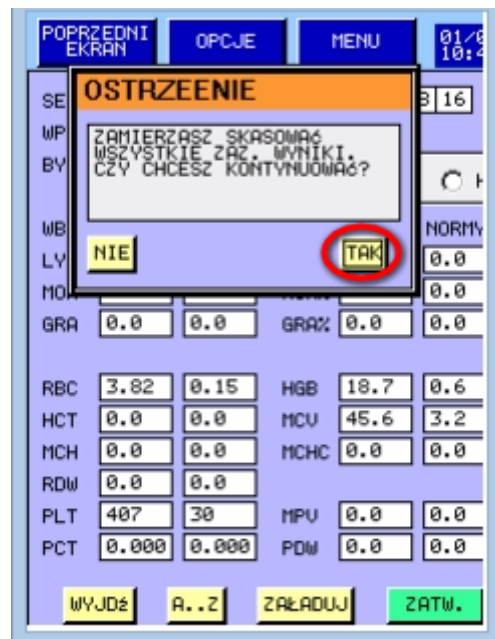

- Po zapisaniu danych następuje powrót do menu wyboru serii i poziomu krwi kontrolnej gdzie pojawia się już wgrany plik z metryką. W tym miejscu można wybrać następny z poziomów i wgrać z pendrive'a dane w sposób opisany wyżej.

